

MASQUE ALTERNATIF à Usage Non Sanitaire type UNS1 **

lutte contre le COVID-19 ** Réf BRUNO lavable



Mot de la Présidente de Mode Grand Ouest, Madame Sylvie CHAILLOUX, 24 avril 2020

Dans le contexte de crise sanitaire COVID-19 et du classement en état d'urgence adopté par le gouvernement, une action de fabrication collective de masque a été mise en place par une trentaine d'entrepreneurs. Nous avons réuni 300 salariés volontaires dans nos entreprises, pour apporter une solution aux besoins importants de masques de protection. Dans les ateliers, nos couturières respectent rigoureusement les gestes barrières. La démarche se veut citoyenne et sans marge bénéficiaire.

DESCRIPTION

Il existe plusieurs catégories de masques. Chaque catégorie correspond à un usage. Le Masque « BRUNO » produit par les ateliers de MODE GRAND OUEST entre dans la catégorie des « masques alternatifs » en complément des gestes barrières. Il est destiné à diminuer le facteur de risque de transmission de l'agent infectieux COVID-19.

L'usage de ce masque est destiné aux populations amenées à rencontrer du public dans le cadre de leurs activités professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.). Il a des propriétés de filtrage sur les particules émises de trois microns compatibles avec cette utilisation.

Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact avec des patients.

Ce dispositif n'est NI un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux) NI un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants FFP2).

UTILISATION

Un masque alternatif est un complément aux gestes barrières qui demeurent les mesures préalables à appliquer et à respecter strictement. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

- Ce masque doit être ajusté étroitement sur le nez, la bouche et le menton de la personne qui le porte pour assurer une étanchéité suffisante vis à vis de l'atmosphère ambiante au niveau du porteur.
- Ce masque bloque les postillons et permet d'éviter de se toucher le visage avec les mains.

Toute mise à disposition de l'équipement est sous l'autorité et la responsabilité du remettteur de l'équipement, particulièrement dans le cadre d'une situation de travail.

Il appartient à l'employeur d'informer l'utilisateur du niveau de protection du produit comme complémentaire des mesures de base de protection.

La remise de cette notice préalablement à la remise des masques à chaque utilisateur est indispensable.

Le masque doit impérativement être lavé avant d'être porté une première fois. (consignes au verso)

USAGE

MASQUE LAVABLE (50 fois) - livré par sachet de 10 (soit 2 masques pendant 5 jours réutilisables pendant (50 semaines).

DURÉE D'UTILISATION

4 heures en continu

Attention : si le masque est retiré, il doit être changé. Ne pas le réutiliser sans lavage.

DESIGNATION

- Matériau filtrant 93% Coton Peigné, 7% Polyester (hors liens) – Tissus français & Fabrication Française.
- A stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie UNS1 selon la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 ».
- Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (RP/20-2805/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1).
Efficacité de filtration des particules de 3 µm > 96%.
Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa 307 L.m-2.s.
- Design établi par l'IFTH et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins <https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection>

MISE EN PLACE DU MASQUE

LE MASQUE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE LAVÉ AVANT D'ÊTRE PORTÉ UNE PREMIÈRE FOIS

Conditionnement : par 100 (10 paquets de 10)

Distribution individuelle : saisir chaque lot de 10 par les liens et ne pas toucher la partie centrale des masques pour les protéger de toute contamination avant emploi.

Les conditions d'utilisation et le port du masque sont aussi importants que le masque lui-même.

Un masque est EFFICACE si on respecte les précautions suivantes :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique,
- Installer soi-même son masque sur le visage, passer le jeu de brides derrière la tête sans les croiser puis abaisser le bas du masque sous le menton,
- Les bords du masque doivent suivre le contour du visage et ne pas bailler,
- Ne plus toucher le masque et surtout ne pas le mettre autour de son cou puis le remettre.



1. Saisir le masque par les liens
Ne pas toucher la partie centrale

2. Nouer les 2 liens derrière la tête

*coloris masque et liens non contractuels
(si bicolore face blanche contre le visage)



Retirer le masque barrière :

- Se laver les mains
- Saisir le masque par les brides sans toucher la partie centrale
- Le placer dans un sac fermé et si possible réutilisable – laver masques et sacs ensemble
- Se laver les mains de nouveau

Lavage du masque barrière : Afin d'éliminer le COVID-19 et tous les agents pathogènes bien respecter les consignes de lavage (Avis ANSM 21/04/2020)



- Lavage en machine ménagère cycle 60° avec une lessive classique pendant 30 minutes minimum
- Séchage en tambour et repassage 120°.



Si vous entretenez les masques dans les conditions indiquées, vous pourrez les porter jusqu'au 50° lavage

Une inspection visuelle doit être réalisée après chaque cycle de lavage, en cas de détection de tout dommage du masque barrière, celui-ci doit être jeté.

Nombre de lavages	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50