

# MASQUE ALTERNATIF à Usage Non Sanitaire type UNS1 \*\* pour la lutte contre le COVID-19 \*\* PASCAL \*\*\*\* PASCALINE avec sublimation



Mot de la Présidente de Mode Grand Ouest, Madame Sylvie CHAILLOUX, 21 avril 2020

Dans le contexte de crise sanitaire COVID-19 et du classement en état d'urgence adopté par le gouvernement, **une trentaine d'entrepreneurs** a aujourd'hui répondu présent en réunissant 300 salariés volontaires dans leurs entreprises, pour apporter une solution aux besoins importants de masques de protection. Les gestes barrières y sont appliqués. Chaque masque est intégralement fabriqué par un(e) seul(e) couturier(e). La démarche se veut citoyenne et sans marge bénéficiaire.

## DESCRIPTION

Il existe plusieurs catégories de masques. Chaque catégorie correspond à un usage.

Le Masque « PASCAL\*\*\*\* PASCALINE avec sublimation » produit par les ateliers de MODE GRAND OUEST entre dans la catégorie des « masques alternatifs » en complément des gestes barrières. Il est destiné à diminuer le facteur de risque de transmission de l'agent infectieux COVID-19.

L'usage de ce masque est destiné aux populations amenées à rencontrer du public dans le cadre de leurs activités professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.). Il a des propriétés de filtrage sur les particules émises de trois microns compatibles avec cette utilisation.

Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact avec des patients.

**Ce dispositif n'est NI un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux) NI un équipement de protection individuelle au sens du règlement UE/2016/425 (masques filtrants FFP2).**

## UTILISATION

Un masque alternatif est un complément aux gestes barrières qui demeurent les mesures préalables à appliquer et à respecter strictement. Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

- Ce masque doit être ajusté étroitement sur le nez, la bouche et le menton de la personne qui le porte pour assurer une étanchéité suffisante vis à vis de l'atmosphère ambiante au niveau du porteur.
- Ce masque bloque les postillons et permet d'éviter de se toucher le visage avec les mains. Toute mise à disposition de l'équipement est sous l'autorité et la responsabilité du remetteur de l'équipement, particulièrement dans le cadre d'une situation de travail.

Il appartient à l'employeur d'informer l'usager du niveau de protection du produit comme complémentaire des mesures de base de protection.

**La remise de cette notice préalablement à la remise des masques à chaque utilisateur est indispensable.**

**Il est recommandé de laver le masque avant d'être porté une première fois. (consignes au verso)**

## USAGE

**MASQUE LAVABLE (10 fois)** - livré par sachet de 10 (soit 2 masques pendant 5 jours réutilisables pendant 10 semaines), ou personnalisé à la demande.

## DURÉE D'UTILISATION

**4 heures en continu**

**Attention :** si le masque est retiré, il doit être changé. Ne pas le réutiliser sans lavage.

## DESIGNATION

- Matériau filtrant 100 % polyester (hors liens) produit en France & Fabrication Française.
- A stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.
- Type de produit : « Masque réservé à des usages non sanitaires de catégorie UNS1 selon la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 ».
- Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (RP/20-6261/DGA MNRBC/2000305/NP Version 1).  
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : 91 %.  
Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa 594 L.m-2.s.
- Design établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins <https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection>

## MISE EN PLACE DU MASQUE

Conditionnement : par 100 (10 paquets de 10) ou personnalisé à la demande.

**Distribution individuelle :** saisir chaque lot de 10 par les liens et ne pas toucher la partie centrale des masques pour les protéger de toute contamination avant emploi.

**Les conditions d'utilisation et le port du masque sont aussi importants que le masque lui-même.**

Un masque est **EFFICACE** si on respecte les précautions suivantes :

- Se laver les mains avec de l'eau et du savon pendant au moins 30 secondes ou avec une solution hydroalcoolique,
- Installer soi-même son masque sur le visage, passer le jeu de brides derrière la tête ou derrière les oreilles selon le modèle, puis abaisser le bas du masque sous le menton,
- Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux index pour l'ajuster au niveau du nez,
- Les bords du masque doivent suivre le contour du visage et ne pas bailler,
- Ne plus toucher le masque et surtout ne pas le mettre autour de son cou puis le remettre.



1. Saisir le masque par les liens  
Ne pas toucher la partie centrale
2. Selon le modèle, passer le jeu de brides derrière la tête ou derrière les oreilles puis abaisser le bas du masque sous le menton.

## Retirer le masque barrière :

- Se laver les mains
- Saisir le masque par les brides sans toucher la partie centrale
- Le placer dans un sac fermé et si possible réutilisable – laver masques et sacs ensemble
- Se laver les mains de nouveau



**Lavage du masque barrière :** Afin d'éliminer le COVID-19 et tous les agents pathogènes bien respecter les consignes de lavage (Avis ANSM 21/04/2020)

- Lavage en machine ménagère cycle 60° avec une lessive classique pendant 30 minutes     
- Séchage en tambour et **REPASSAGE SANS VAPEUR.** 

Si vous entretenez les masques dans les conditions indiquées, vous pourrez les porter jusqu'à 10° lavage.

Une inspection visuelle doit être réalisée après chaque cycle de lavage, en cas de détection de tout dommage du masque barrière, celui-ci doit être jeté.

Nombre de lavages	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10